


NUANCIER

0.0g/l < Taux < 0.2g/l



Taux $\geq 0.2g/l$

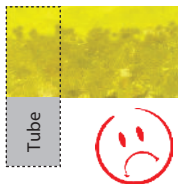

Fabriqué par :
TURDUS TESTERS OF CAPACITY
770 Avenue de la Méridienne
48100 MARVEJOLS - FRANCE

1 ÉTHYLOTEST À USAGE UNIQUE

pour les conducteurs novices et
pour les conducteurs de transport
en commun



**Laboratoire
Terpan**

SEUIL DE DETECTION
0.10mg/l d'air expiré
0.2g/l de sang



Distribué par Terpan

14, rue du Clos Hubert
28230 Gallardon - France
www.terpan.fr

PER02511

1 Tenir l'éthylotest et
l'embout buccal pendant
30 secondes dans vos
mains fermées.




2 Mettre en service
le test en perforant les
opercules à l'aide de
l'embout buccal.



3 Insérer l'embout buccal sur l'éthylotest
du côté de l'anneau rouge.

4 Inspirer profondément puis
souffler lentement
dans l'embout buccal
en une seule fois dans le sens indiqué.
AVERTISSEMENT: le souffle doit être
continu et sans interruption.

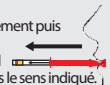

5 Cesser de souffler dès
que la couleur de pastille
correspond à un des
trois cas ci-contre.



Utilisation : 5°C à 40°C
Stockage : -20°C à 70°C



Fabriqué par Turdus SA

770, avenue de la Méridienne
48100 Marvejols - France
www.turdus.fr



Mon taux d'alcool dans le sang à jeun*

	60 kg			
1	0,24	0,28		
2	0,48	0,56		
3	0,71	0,83		
4	0,95	1,11		

	80 kg		90 kg	
1	0,18	0,21	0,16	0,19
2	0,36	0,42	0,32	0,37
3	0,54	0,63	0,48	0,56
4	0,71	0,83	0,63	0,74



25cl de premix Alc. 40% Vol. 25cl d'alcool Alc. 45% Vol. 15cl de vin Alc. 12% Vol. 25cl de bière Alc. 5% Vol.

* verres standards

** pic d'alcoolémie, soit une heure après le dernier verre

Pour une personne en bonne santé, le taux d'alcool descend de 0,1 à 0,15 g/Litre de sang par heure.

Avant utilisation :

Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicament...) avant d'effectuer un test.

L'alcoolémie maximale est atteinte 45 min à 60 min après le dernier verre d'alcool.

Interprétation :

1- Attendre que la pastille redevienne entièrement rouge. En présence d'alcool, le réactif se colore en vert.

2- Comparer la couleur obtenue à celles du nuancier fourni (sur le recto de cette notice) :

Si la couleur est comparable à celle indiquée dans le rectangle vert, vous pouvez conduire.

Si la couleur est comparable à celle indiquée dans le rectangle rouge, vous avez une alcoolémie supérieure au taux contraventionnel : NE PAS CONDUIRE

3- Au delà de 10 minutes, l'interprétation n'est plus possible

Les résultats de ce test ne peuvent en aucun cas être opposables à ceux obtenus par les forces de l'ordre, lors de contrôles officiels. Les décisions prises par l'utilisateur en fonction du résultat de ce test sont sous son entière responsabilité. Elles ne peuvent engager celle du fabricant et/ou de ses distributeurs.

Les éthylotests chimiques sont des indicateurs d'alcoolémie et non des instruments de mesure.

En cas de doute sur votre interprétation, nous vous conseillons de ne pas conduire.

Au delà de 0.5g d'alcool par litre de sang, les risques d'accident sont multipliés par 3.

Conduire après avoir consommé de l'alcool fait courir des risques extrêmes au conducteur, ses passagers et tous les usagers de la route.

Précautions :

Ce produit est un tube en verre donc fragile. **Tenir hors de la portée des enfants.** Ne pas utiliser le test si les membranes d'aluminium sont déjà perforées, si le verre est fêlé ou cassé, ou si le réactif est déjà vert. Ne pas diriger le test vers une personne pendant le soufflé. Ne pas inspirer. Ne pas avaler. En cas de contact du réactif avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau et demander si besoin un avis médical. En cas d'ingestion, appeler un service d'urgence médicale (par exemple le 15 ou le 112). A jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest.

L'utilisation non conforme à la notice et/ou le non-respect des précautions dégage le fabricant et ses distributeurs de toute responsabilité.